

## **Памятка помощи по настройке и использованию технического средства реабилитации**

Благодарим Вас за приобретение тифлофлешплеера Войса.

Следуя пунктам данной памятки, Вы сможете дойти до основного руководства по эксплуатации, чтобы узнать все возможности тифлофлешплеера.

### 1. Достаньте тифлофлешплеер из коробки.

Расположите устройство так, чтобы решётки динамиков, защищающие их, были направлены на Вас, сверху находились кнопки ★ (звездочка), кнопка стрелка в низ↓ и разъем для SD карты тифлофлешплеера.

На задней части устройства в нижнем правом углу находится кнопка с рельефной точкой для включения и выключения (далее кнопка «Включения\Выключения»).

На верхней стороне корпуса устройства расположен цилиндрический разъем для подключения сетевого адаптера и разъем USB Type-C для подключения к компьютеру и зарядки от него.

Возьмите сетевой адаптер и шнур из коробки и подключите тифлофлешплеер для зарядки на срок не менее одного часа.

Используйте только источник питания, поставляемый производителем в комплекте с аппаратом или с аналогичными техническими характеристиками. Использование другого источника питания может привести к выходу из строя аппарата, а также риску поражения электрическим током и возгорания.

Перед подключением к сети убедитесь, что её напряжение соответствует требованиям зарядного устройства. В случае несоответствия параметров сети требованиям зарядного устройства подключение к ней запрещено. Розетка, используемая для подключения блока питания аппарата, должна располагаться в легкодоступном месте.

2. После зарядки. Вставьте SD-карту в разъем на верхней стороне корпуса устройства, между цилиндрическим разъемом для зарядки и USB Type-C.

Включите тифлофлешплеер. С задней стороны устройства в нижнем правом углу нажмите кнопку с рельефной точкой и удерживайте до 15 секунд, после чего тифлофлешплеер произведет серию вибросигналов, оповещающих о включении, далее устройство сообщит «Тифлофлешплеер включается,

пожалуйста подождите». После необходимо дождаться сообщения «Устройство готово к работе».

Внимание! Если устройство при удержании кнопки включения воспроизводит щелчки- то аккумулятор разряжен и его необходимо подключить к зарядному устройству на срок до одного часа.

### 3. После включения

Вы можете отрегулировать громкость.

Чтоб увеличить или уменьшить громкость над центральной кнопкой с лицевой стороны устройства в верхней части диска расположена нажимная качелька для регулировки громкости. Левая часть качельки с тактильным обозначением в виде минуса (далее кнопка уменьшения громкости) при нажатии уменьшает громкость, а правая с тактильным обозначением в виде трёх точек (далее кнопка увеличения громкости) - увеличивает.

4. Для удобства Вы можете подключить наушники, которые также входят в комплект.

Для этого нащупайте с правой стороны корпуса устройства расположены два разъёма mini-jack: для **подключения наушников** (поддерживается стерео) или гарнитуры ближе к лицевой стороне аппарата.

Для подключения внешнего линейного аудиоустройства или микрофона - ближе к задней стороне аппарата.

5. Теперь устройство готово к работе.

На лицевой стороне в центральной части корпуса устройства находится тактильно различимое основание с основными элементами управления, используемыми в каждом из режимов работы, которое выполнено в виде диска, приподнятого над остальной поверхностью корпуса аппарата.

На верхней стороне корпуса устройства расположены следующие разъёмы слева направо.

6. Чтобы выбрать в нужный режим работы тифлофлешплеера нажмите на кнопку находящиеся вне диска на лицевой стороне устройства с лева в нижней части устройства с тактильным обозначением в виде штриха **для переключения режимов работы (далее кнопка «Режим»)**.

(8.Подраздел 4 точка 3. Выбор режимов и подрежимов работы) найдите режим **Фонотека**- она следующая после режима Текстовые файлы.

Далее нажмите с права в нижней части устройства кнопку с тактильным обозначением в виде двух штрихов для переключения под режима работы (далее кнопка «Подрезим»).

Выберете. **Внешний накопитель**

Далее слева от центральной кнопки в диске расположена кнопка с тактильным обозначением в виде направленной **влево стрелки** (далее кнопка «**Влево**»), а справа - кнопка с тактильным обозначением в виде направленной **вправо стрелки** (далее кнопка «**Вправо**»). Эти кнопки используются для перемещения по пунктам под режимов и меню, а также для навигации внутри прослушиваемых файлов.

Выбираем «**Руководство по эксплуатации**» и подтверждаем нажатием на кнопку в центре диска с тактильным обозначением **в виде кольца** (далее «**Центральная кнопка**») для подтверждения входа под режим. После чего тифлофлешплеер воспроизведет речевое сообщение об открытии накопителя.

Если Вы выбрали не тот файл- необходимо нажать кнопку находящуюся под центральной кнопкой в нижней части диска с тактильным обозначением в виде полуокружности (далее кнопка «**Выход**») для возврата и снова произвести действия для выбора подрежима .

Если необходимо передвигаться внутри прослушиваемых файлов или перемещения по пунктам подрежимов и меню используются кнопка с тактильным обозначением в виде направленной влево стрелки (далее кнопка «**Влево**»), а справа - кнопка с тактильным обозначением в виде направленной вправо стрелки (далее кнопка «**Вправо**») расположенные слева от центральной кнопки в диске.

Под центральной кнопкой в нижней части диска находится кнопка с тактильным обозначением в виде полуокружности для выхода из под режима или меню (далее кнопка «**Выход**»).

Все оставшиеся кнопки описаны в инструкции.

7. Для выключения тифлофлешплеера. С задней стороны устройства в нижнем правом углу нажмите кнопку с рельефной точкой и удерживайте до 2 секунд, после чего устройство сообщит «**Выключение устройства**» и выключится после вибросигнала.

Проект реализуется Национальной ассоциацией участников рынка ассистивных технологий «АУРА-Тех» при поддержке Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы и на средства конкурса грантов «Москва — добрый город».

Консультацию по вопросам обеспечения тифлотехникой и реабилитации для незрячих и слабовидящих можно получить по телефону: 8(800) 600- 05-22, 8(989)209-60-66